

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

CINTA ANTIRRONQUIDOS SNOREB




ANTI001

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviotecnico@servitech.com.ar

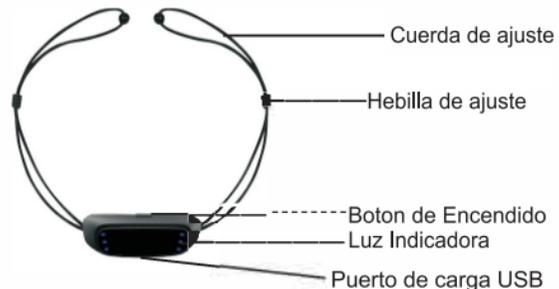

Consejo: Si tienes la piel seca en otoño e invierno y sientes hormigueo al principio de la aplicación, el efecto será mejor después de aplicar una loción hidratante.

Parámetros del producto

Nombre del producto: Dispositivo Inteligente Antirronquidos

Tamaño del producto: 50-20-12mm


Peso del producto: 13.7g

Voltaje nominal: 3.7V

Requisitos de carga: 5V 5V

Accesorios: Unidad principal + cordón ajustable-1 Cable de datos USB*1 Manual*1

1. Mantenga pulsado el botón de encendido durante 2 segundos.
2. Pulse brevemente el botón de encendido para ajustar la intensidad.
3. La intensidad de encendido por defecto es de 1 marcha, un total de 6 marchas se seleccionan cíclicamente (indicador luminoso constante). El número de luces es el número de marchas.
4. Durante el funcionamiento, la luz indicadora azul está siempre encendida.
5. La luz azul parpadea durante el proceso de carga, y la luz azul está siempre encendida cuando está completamente cargada, y no se puede encender durante la carga.

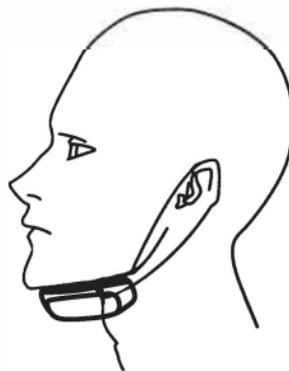

Descripción de la función

Condiciones de arranque del producto: 1-2 segundos después de recibir

la señal de la fuente de sonido, 2-3 segundos de funcionamiento a distancia, aproximadamente 10 segundos de funcionamiento continuo a distancia y funcionamiento cíclico.

Este producto reconoce con precisión los ronquidos mediante la tecnología de reconocimiento de sonido. Después del reconocimiento, el producto enviará un ligero pulso para intervenir físicamente al usuario de débil a fuerte, a fin de lograr el efecto de detener los ronquidos.

Nota: la intensidad de intervención del producto varía de baja a alta. Seleccione el modo de funcionamiento que más le convenga.

Asuntos que requieren atención

- No ponga este producto en una fuente de fuego
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños
- No lavar con detergentes corrosivos o agua
- No utilice un adaptador de corriente de más de 5 V para cargarlo.
- No lo cargue durante más de 2 horas

Método de eliminación de baterías recargables

1. La batería de litio recargable incorporada en este producto contiene sustancias que pueden contaminar el medio ambiente. Cuando deseche este producto, por favor no lo ponga junto con la basura doméstica general, y saque la batería.
2. Antes de desmontar el producto y extraer la batería de litio, asegúrese de apagar el aparato.
3. Extraiga la batería de litio, haga palanca en la hebilla de la cubierta superior del producto, abra la cubierta superior del producto y, a continuación, extraiga la batería de litio.
4. Las baterías de litio extraídas deben desecharse de forma segura y depositarse en el centro de reciclaje de baterías designado por el gobierno, lo que favorece la protección del medio ambiente. Nota especial: extraiga la pila sólo cuando deseche el producto. Antes de sacarla, asegúrese de que la batería está agotada. No lo desmonte personal no profesional.