

MAWE
by GADNIC

SACALECHE
ELÉCTRICO
SILKE2



MANUAL DE USUARIO


BE0002

Breve introducción

Amamantamiento natural, innovador protector de senos, succiona como un bebé, cómodo y de alta eficiencia.

Motor de bomba


- a. Botón de encendido / apagado
- b. Modo de expresión de 2 fases: estimulación y expresión
- c. Disminuir el nivel de succión
- d. Aumentar el nivel de succión

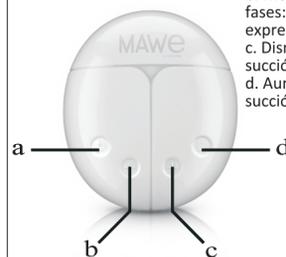

Nota: utilice una fuente de alimentación de 5V 1A

Componentes

- 1. Cuerpo con pechera
- 2. Diafragma de silicona
- 3. Tapa
- 4. Tubo
- 5. Válvula de pico de pato
- 6. Botella
- 7. Pezón
- 8. Motor de bomba
- 9. Cable USB

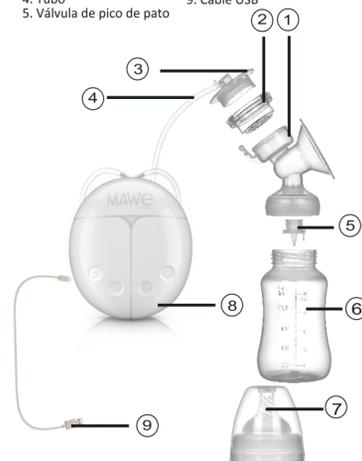

Nota: 11 es para extractor de leche doble

Preparación

Asegúrese de haber limpiado y esterilizado todos los componentes del extractor de leche. Lávese bien las manos antes de tocar los componentes.

NOTA: Un vacío fuerte no significa una alta eficiencia de bombeo, al contrario, puede dañar las glándulas mamarias y capilares de la mujer.

Ensamblaje



- 1. Inserte la válvula en el cuerpo del protector de mama y conéctela firmemente.
- 2. Fije el cuerpo del protector de mama al biberón.
- 3. Fije el diafragma en la parte superior del cuerpo del protector del pecho, presione hacia abajo con el dedo para asegurarse de que esté firmemente unido.



- 4. Fije la tapa y el tubo al final del diafragma.
- 5. Enchufe al cable USB y conecte el otro extremo al cuerpo del protector del pecho, presione hacia abajo con el dedo para asegurarse de que esté firmemente unido.
- 6. Puede ajustarlo como extractor de leche simple / doble cambiando un conector.

Operación

1. Lávese bien las manos y el pecho. Manténgase relajado, siéntese en sillas con cojín.
2. Sostenga su pecho, mantenga el pecho en forma de copa de cuerno. Asegúrese de que su pezón esté en el centro. Elija la copa para el pecho de acuerdo con el tamaño de sus senos.
3. Enchufe a la fuente de alimentación, toque el botón de encendido, el extractor de leche comenzará a funcionar.
4. Toque "+", aumente la frecuencia y la succión. Toque el botón "-", disminuya la frecuencia y la succión. Puede cambiar el modo de pecho y masaje, el masaje se muestra como luz roja, la luz azul aparece como extractor de leche.
5. Toque el botón de encendido / apagado para apagar el extractor de leche después de usarlo.

Solución de problemas

La succión es demasiado pequeña o no hay succión

1. Compruebe si el cilindro de silicona es suave y dócil presionando la tapa.
2. Compruebe si el cilindro de silicona quedó bien ajustado y asegúrese de que el sello esté instalado correctamente.
3. Compruebe si la válvula de pico de pato de succión tiene fugas.
4. Compruebe si la tubería principal y la parte de conexión se han instalado en su lugar.
5. No tuerza ni aplaste el tubo.
6. Verifique que ambos lados del tubo goteen y si fluye con facilidad, en caso de que no, vuelva a conectarla en ambos extremos.

Métodos de desinfección

Utilice el esterilizador a vapor de botella para la desinfección durante 8 minutos, o coloque los componentes en agua hirviendo para desinfectar durante 10 minutos, el nivel del agua debe estar por encima de los componentes.

Almacenamiento de leche materna

Utilice una tapa sellada o una bolsa de almacenamiento de leche para almacenar leche materna fresca, la leche materna debe montarse en 3/4 como máximo de la tapa o la bolsa de almacenamiento de leche.

Colóquelo en el refrigerador para guardarlo, el tiempo máximo que puede pasar en el congelador es de dos semanas.

Calentamiento de la leche materna

Utilice un calentabiberones para calentar la leche congelada a una temperatura de alrededor de 37 °C. No use microondas o agua hirviendo para calentar.

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar
☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar