

6. CONSEJOS PARA UN BOMBEO EXITOSO

Debe elegir el mejor momento del día para extraer la leche materna, por ejemplo: por la mañana, antes o después de alimentar al bebé por primera vez o cuando el bebé no vaya a beber más leche materna después de alimentarlo. Puede extraer leche durante las vacaciones de trabajo. Es posible que deba intentarlo varias veces antes de tener éxito en el uso de la bomba. Afortunadamente, este extractor de leche automático es fácil de armar y usar, y pronto podrá extraer leche materna.

Antes del primer uso, familiarícese con la operación y utilice en un tiempo que no sea apresurado. Imágenes de su bebé ayudan a promover el reflejo de "lactancia". El ambiente cálido también ayuda a extraer la leche, trate de extraer la leche después del baño o coloque una toalla caliente sobre el seno durante unos minutos antes de extraer la leche. Es posible que a los bebés les resulte más fácil succionar cuando succionan el otro seno o después de amamantar.

Si siente dolor durante el proceso, deténgase para consultar a expertos en lactancia.

7. INSTRUCCIONES SENCILLAS

- Presione el botón de encendido para ingresar al modo de estimulación, presione el botón de modo para ingresar al modo exprés y luego presione nuevamente para ingresar al modo de masaje.
- Modo masaje (un total de 9 niveles)
- Modo de estimulación (un total de 9 niveles)
- Modo Exprés (un total de 9 niveles)

Por cada clic, la pantalla muestra el nivel actual.

La máquina se apagará automáticamente luego de 30 minutos por defecto. La pantalla de la batería parpadeará cuando esté cargada. Después de la carga completa, mostrará la cuadrícula completa. La leche en el biberón no debe estar demasiado llena ni exceder la válvula de pico de pato.

8. INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Lávese bien las manos y asegúrese de que sus senos estén limpios. Relájese y siéntese en una silla cómoda. (Puede usar un cojín para apoyar su espalda). Asegúrese de tener un vaso de agua a su lado.
2. Sostenga suavemente el seno, coloque la cubierta de la trompeta y asegúrese de que su seno esté centrado, y la almohadilla de masaje para lactancia forme un sello.
3. Presione el botón de encendido/apagado, la pantalla se iluminará después del arranque y la bomba comenzará con el modo de lactancia automáticamente, presione + o - para elegir la fuerza del masaje, cuando la leche comience a fluir, presione la tecla de conversión de modo para cambiar al modo de bombeo, elija la fuerza de succión y la frecuencia de bombeo más cómodas.
Nota: no necesita usar la succión más grande, solo use la succión con la que se sienta cómoda.
4. Después de terminar de extraer leche, apague el extractor de leche y retire con cuidado el cuerpo principal del extractor.
5. Desensosque el biberón del cuerpo principal de la bomba para prepararlo para alimentación/ almacenamiento. Siga las instrucciones del capítulo "Limpieza y desinfección" para limpiar otras piezas usadas del extractor de leche.
6. Desenchufe el componente principal del motor.

9. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Antes de usar por primera vez, limpie y desinfecte el extractor de leche. Limpie todas las piezas cada vez que lo use. Retire completamente la bomba, así como la válvula. Tenga cuidado de quitar y limpiar la válvula de pico de pato. Si la válvula está dañada, la bomba no funcionará correctamente. Para quitar la válvula de pico de pato, tire suavemente del lado pequeño de la válvula. Limpie todas las piezas con agua caliente y un poco de detergente, luego enjuague bien.
Para limpiar la válvula de pico de pato, frote suavemente con agua limpia con unas gotas de jabón de limpieza, no inserte ningún objeto en la válvula. Use una olla esterilizadora especial para desinfectar todas las partes o hierva en agua hirviendo durante 5 minutos.

10. ALMACENAMIENTO Y CALENTAMIENTO DE LA LECHE MATERNA

Almacenamiento de leche materna

Cuando termine de extraerse la leche, cubra o selle herméticamente la bolsa de almacenamiento, refrigere o congele inmediatamente. La leche materna se puede conservar en frío durante 48 horas y en el congelador durante 3 meses.

Calentamiento de leche

Después de descongelar, caliente la leche materna con un calentador de leche o agua tibia, no use microondas ni agua hirviendo para calentar ya que, se pueden perder los nutrientes. Cuando la leche materna esté calentada puede alimentar a su bebé.

ATENCIÓN

1. Si desea congelar la leche materna, no llene completamente la bolsa. Llénelo a 3/4 y deje un buen espacio para la expansión del hielo. No coloque la leche en la puerta lateral del refrigerador.
2. Para conservar los ingredientes nutricionales de la leche materna, coloque la leche congelada en el congelador para descongelarla la noche anterior, use agua tibia (menos de 37 grados) para calentar el biberón o la bolsa.
3. Agite suavemente la botella o la bolsa para que la separación de grasa se mezcle uniformemente en la leche.
4. No ponga leche congelada en microondas o agua hirviendo, para evitar la pérdida de nutrientes, también para evitar quemar al bebé.
5. La leche materna descongelada no se puede volver a congelar, no mezcle leche materna fresca con leche descongelada.



MANUAL DE USUARIO

BE0006


1. INTRODUCCIÓN

Este extractor de leche automático tiene un diseño único que le permite mantener una posición de ordeñado más cómoda. El diseño suave del cojín de masaje brinda una sensación suave y cálida y puede imitar la acción de succión del bebé para que la leche materna fluya de manera silenciosa, suave y rápida. La bomba es compacta y fácil de montar. Todas las piezas se pueden limpiar de forma segura con el lavavajillas. La bomba no contiene bisfenol A.

Los expertos en lactancia dicen que la leche materna es el mejor alimento nutritivo para los bebés menores de un año. Después de los seis meses de vida, los bebés pueden continuar con la lactancia y ser alimentados gradualmente con algún alimento complementario. La leche materna atiende especialmente a las necesidades de los bebés, ya que contiene anticuerpos que protegen a los bebés de infecciones y alergias.

El extractor de leche puede ayudar a prolongar el tiempo de lactancia. Puede extraer y almacenar leche materna, incluso si no puede amamantar el bebé aún puede disfrutar de la leche materna. Debido a que el extractor es compacto y muy aislado durante la extracción, puede llevarlo en cualquier momento para que pueda extraer leche materna para su bebé en cualquier momento conveniente.


Esquema del motor principal Diagrama de cristal líquido de la siguiente manera:

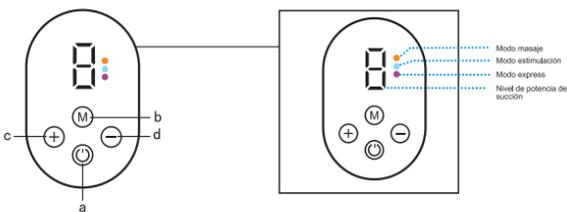

- a. ENCENDIDO/ APAGADO
- b. Cambiar el modo de succión
- c. Aumentar el nivel de succión
- d. Disminuir el nivel de succión

2. GUÍA DE PIEZAS

1. Tapa antipolvo
2. Cojín de masaje
3. Conector
4. Diafragma de silicona
5. Válvula
6. Biberón
7. Pezón
8. Motor de bomba
9. Cable y adaptador

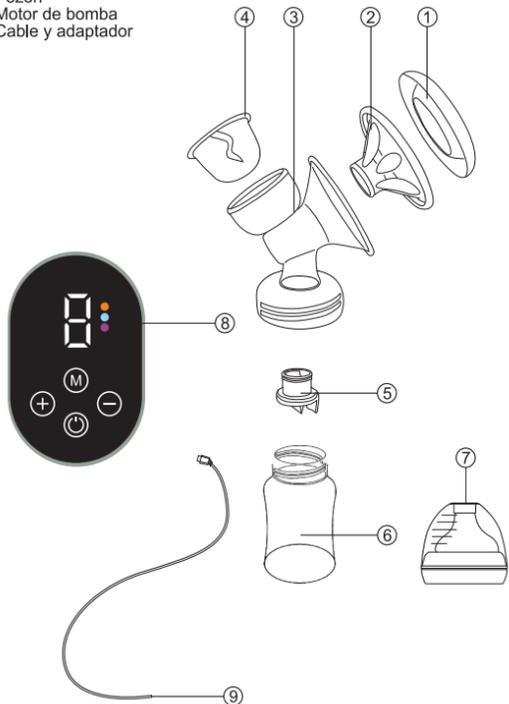

3. PREPARACIÓN Y ENSAMBLAJE

Antes del primer uso, limpie y desinfecte todos los componentes según el capítulo "Limpieza y desinfección". Desinfecte todos los componentes antes de cada uso.

ENSAMBLADO DE LA BOMBA

Nota: asegúrese de esterilizar todos los componentes del extractor de leche y lávese bien las manos antes de tocar los componentes limpios. Tenga cuidado ya que los componentes limpios pueden permanecer calientes.

Antes de ensamblar, desinfecte todos los componentes de la bomba y lávese bien las manos.

Consejo: puede que le resulte más fácil montarlo cuando la bomba está mojada.

POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE EL DIAGRAMA DE INSTALACIÓN A CONTINUACIÓN

1. Inserte la válvula en la parte inferior del conector.
2. Enrosque el conector en el biberón hasta que quede completamente fijo.

4. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMUNES

Falla en la succión	Verifique si la instalación correcta de la válvula de pico de pato del ensamblaje de la bomba está dañada (tenga en cuenta que al limpiar no debe frotar) para asegurarse de que el diafragma de silicona y las almohadillas estén firmemente adheridas al cuerpo principal del dispositivo de succión de leche para lograr el estado ideal de sellado.
Incapaz de succionar leche	No se puede expulsar la leche para garantizar una succión adecuada y el montaje completo del extractor de leche. Relájese y vuelva a intentarlo. Después de repetidos intentos, es posible que pueda exprimir la leche. Lea los consejos para una aspiración exitosa.
Dolor en los senos al ordeñar	Se puede deber a una fuerza excesiva, no necesita usar el dispositivo de succión para producir toda la succión. Primero puede masajear en la estimulación de masaje de alto grado y luego convertirlo al modo de leche materna. También puede consultar a un especialista en salud o un especialista en lactancia.

5. USO DEL EXTRACTOR

Cuando sacar leche materna Se recomienda (a menos que lo digan los expertos) esperar hasta que la lactancia y el tiempo de alimentación se vuelvan normales (al menos 2 a 4 semanas después del nacimiento del bebé).

Casos excepcionales Tiene que amamantar al bebé en el hospital. Cuando tenga dolor en los senos (dolor o hinchazón), puede extraer una pequeña cantidad de leche antes de amamantar o entre 2 tomas, para aliviar el dolor y ayudar al bebé a succionar más fácilmente. Cuando el pezón duele o está agrietado, puede usar la bomba después de que el pezón se haya curado. Cuando esté temporalmente separada de su bebé, pero desea continuar amamantando durante el reencuentro, debe extraerse leche regularmente para estimular la secreción de leche.

