

MANUAL DE INSTRUCCIONES



Más cuidados para la madre y el bebé

Sacaleches

Proporciona una forma de tener las manos libres, sensación más agradable y tranquilizadora de extraerse leche. El extractor de leche de diseño compacto le permite utilizarlo en cualquier momento y lugar. Es lo suficientemente pequeño y ligero como para caber dentro de un sujetador.

- ✓ Sin tubos, sin cables, sin biberones mecedores.
- ✓ No hay horario de extracción, se extrae leche donde se desee.
- ✓ Dispositivo integrado, fácil de montar y limpiar.
- ✓ Fabricado con PP de calidad alimentaria y gel de sílice, sin BPA.

SEGURO - CÓMODO - EFICAZ

Nuestros sacaleches de alta calidad no contienen gel de sílice tóxico como el bisfenol A y los ftalatos para garantizar la comodidad y la seguridad. Ofrece una forma rápida y móvil de extraer leche. Simple y todos los accesorios son extraíbles, fáciles de limpiar y desinfectar. Pueden desinfectarse con agua hirviendo.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- No utilice un adaptador de corriente no original.
- Para dejar de utilizarlo, pulse primero el botón de apagado.
- No limpie ni desinfecte el extractor de leche ni el adaptador de corriente.
- Cuando desee utilizar un extractor de leche en la etapa de baja lactancia, siga las indicaciones de los médicos y el personal de enfermería.
- Si la extracción de leche falla, no continúe durante más de cinco minutos usándolo.
- Si tiene problemas o dolor, consulte a su especialista en leche materna o médico.
- No utilice extractores de leche durante el embarazo, ya que pueden provocar un aborto.
- Lávese las manos con jabón y manténgalas secas antes de instalar los accesorios.
- Evite utilizar limpiadores fuertes o productos de limpieza duros para evitar rayar o dañar el producto.
- Almacénelo en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa.
- Sustituya los accesorios o productos que muestren signos de desgaste o daños.
- No utilice un cepillo de limpieza en la válvula, ya que podría dañarla o acortar su vida útil.
- Este es un producto de cuidado personal y no se recomienda compartirlo.
- Asegúrese de utilizar un protector mamario adecuado.
- No deje que los bebés jueguen con accesorios pequeños para evitar el riesgo de asfixia.
- Recomendación: Se recomienda programar el reemplazo periódico del pico de pato cada dos o tres meses de uso regular. Esta práctica ayuda a asegurar un rendimiento óptimo y prevenir posibles inconvenientes.
- Inspección y Reemplazo: Es crucial realizar inspecciones visuales frecuentes. Si se observan signos de desgaste evidente, cualquier tipo de daño físico como fisuras o deformaciones, o si el pico de pato ya no garantiza un sellado adecuado, procédase con el reemplazo de forma inmediata, sin importar el tiempo transcurrido desde su última sustitución.


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1 x Protector mamario de silicona

1 x Base de la válvula

1 x Silicona Separación gas+líquido

1 x Máquina principal

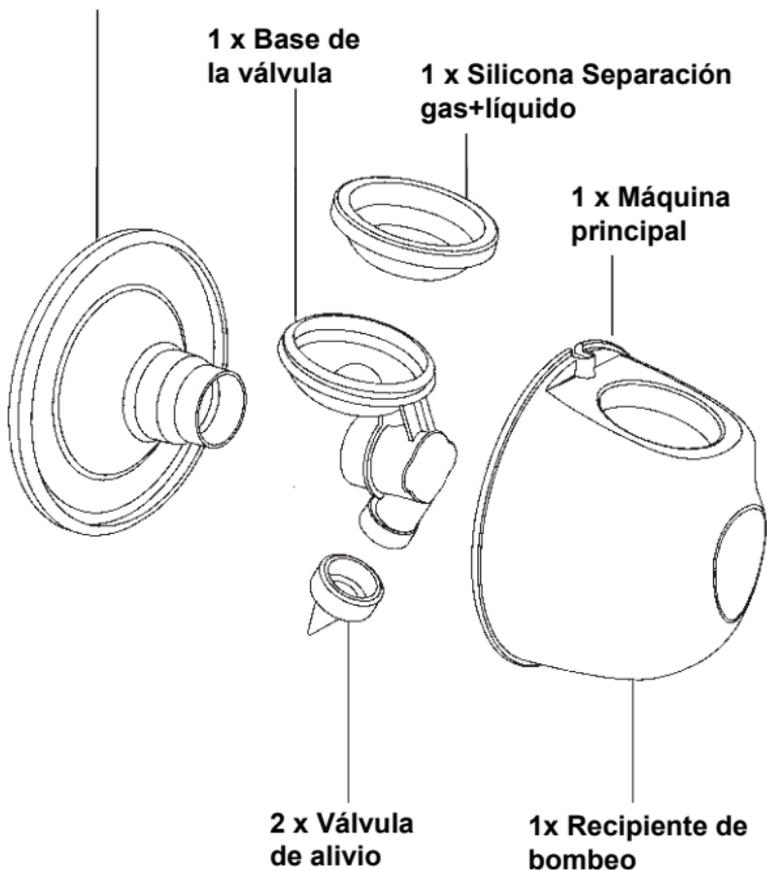

LIMPIEZA

1. Antes del primer uso

- a. Retire todos los accesorios.
- b. Lavar con agua tibia y jabón.
- c. Enjuaguelo bien.
- d. Sumerja los accesorios en agua y hiévalos durante 3-5 minutos. Utilice una olla grande para evitar que los accesorios toquen el fondo o los lados de la olla.
- e. Elimine el exceso de agua y colóquelos en una rejilla especial o en un paño limpio para que se sequen al aire.

2. Después de cada uso

Limpieza regular


- a. Retire todos los demás accesorios (cuenco de extracción, protector mamario de silicona, válvula de pico de pato y separación de gas-líquido de silicona).
- b. Enjuagar con agua fría inmediatamente después de su uso.
- c. Lavar con agua tibia y jabón. El diafragma de silicona puede limpiarse suavemente con los dedos.
- d. Séquelos bien.
- e. Elimine el exceso de agua y colóquelo en una rejilla especial o en un paño limpio para que se seque de forma natural.

3. Cómo desinfectar

- a. Siga las instrucciones de limpieza 2.a a 2.e.
- b. Sumerja los accesorios en agua y hiévalos durante 3-5 minutos. Utilice una olla grande para evitar que los accesorios toquen el fondo o los lados de la olla.
- c. Elimine el exceso de agua y colóquelos en una rejilla especial o en un paño limpio para que se sequen al aire.

FUNCIONAMIENTO DEL SACALECHES

Panel de funcionamiento del sacaleches

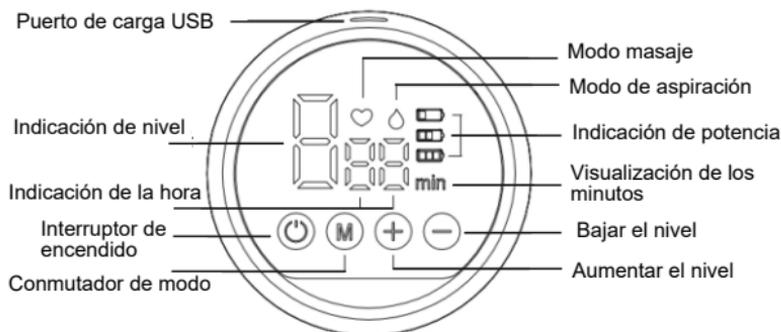

Utilizar el extractor de leche

Pulse "Interruptor de encendido" para encenderlo (visualización del indicador de batería).

Pulse "Interruptor de encendido" para apagarlo (visualización del indicador de batería).

Tras ponerse en marcha, entrará automáticamente en el modo de masaje preestablecido de 2 minutos y, a continuación, cambiará al modo de extracción de leche o de mezcla y se apagará automáticamente en 30 minutos.

Cada modo tiene 9 niveles.



Modo masaje: pulse (+) o (-) para aumentar o disminuir el masaje,
Modo Succión: pulse (+) o (-) para aumentar o disminuir la succión.
Modo mixto: pulse (+) o (-) para aumentar o reducir el número de masajes.

Nota: En el modo de mezcla, los niveles de succión y ritmo son los mismos que los de masaje y succión del pecho, por lo que puede ajustar sus niveles antes de cambiar al modo de mezcla.

FUNCIONAMIENTO DEL SACALECHES

1. No te preocupes si la leche materna no fluye inmediatamente. Permanezca relajada y continúe extrayéndose leche.
2. Si no consigue extraerse leche con éxito, no lo haga de forma continuada durante más de 5 minutos cada vez. Puede intentarlo en otro momento.
3. No es necesario que utilices todos los modos, sólo los que te resulten cómodos.
4. El sacaleches se apagará automáticamente transcurridos 30 minutos.


Cómo montarlo

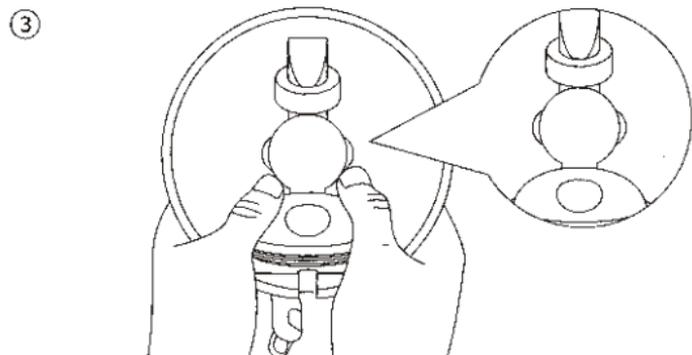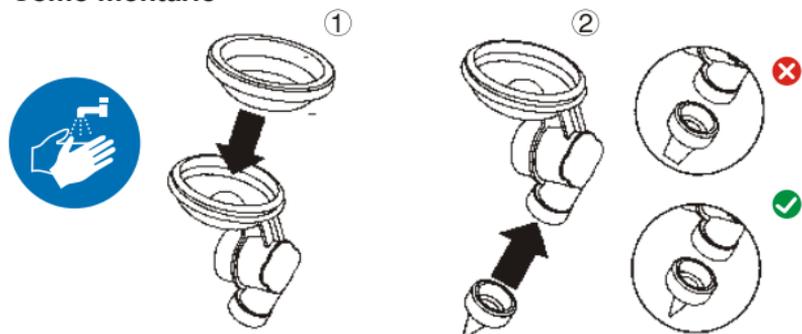


FUNCIONAMIENTO DEL SACALECHES

④

Cómo montarlo

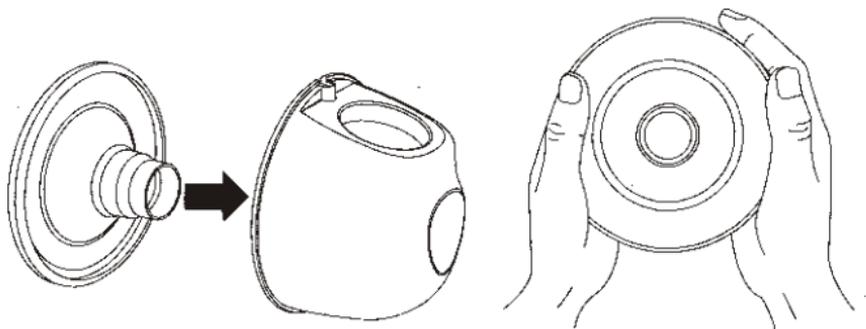


⑤

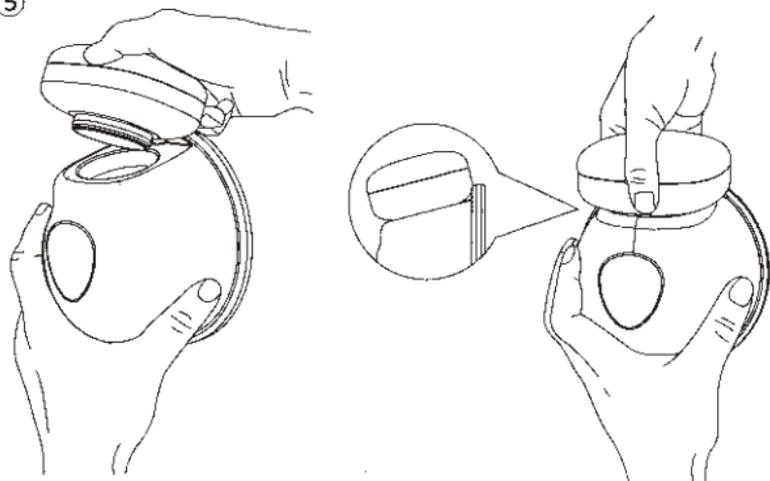


INSTRUCCIONES DE USO



En la colocación del sujetador

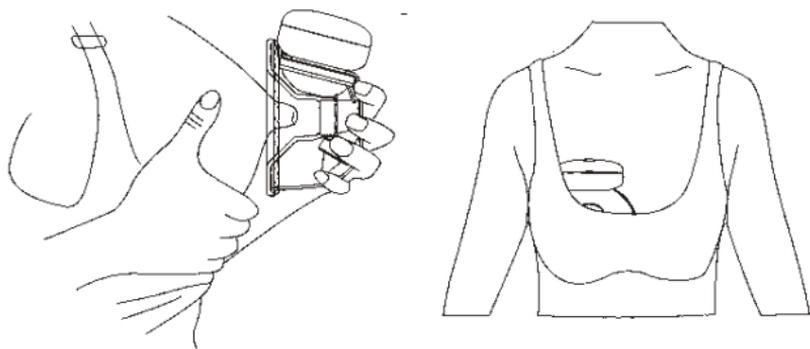

Apague y retire el extractor de leche

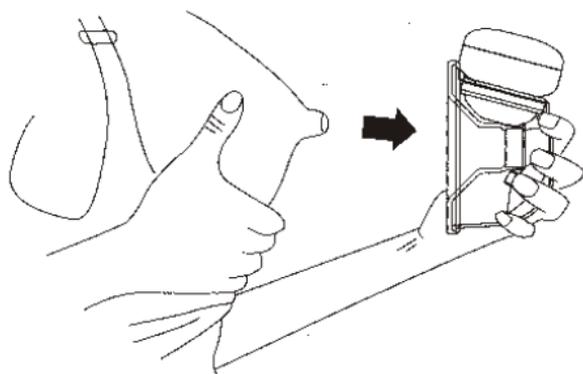

INSTRUCCIONES DE USO

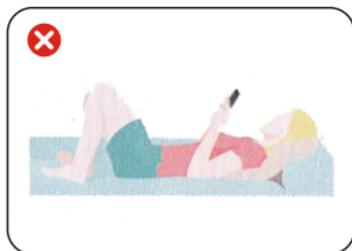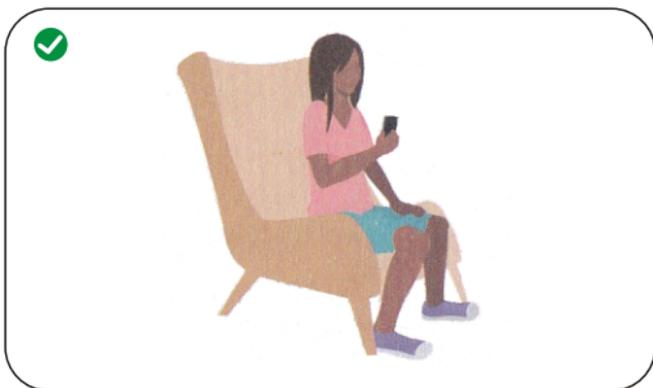

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El problema	La propuesta
Fallo en la extracción de leche	<ul style="list-style-type: none">-Asegúrese de que la succión es adecuada y la bomba está bien montado.-Relájese e inténtelo de nuevo, la leche fluirá con éxito después de repetidos intentos.
Succión débil o sin succión	<ul style="list-style-type: none">-Asegúrese de que la válvula está instalada en en la dirección correcta y compruebe o desgaste. Sustituya la válvula si es necesario.-Compruebe que todas las piezas estén bien montadas.
Dolor en el pezón	<ul style="list-style-type: none">-Pida consejo a un asesor médico sobre leche materna.