


Care
by GADNIC

MANUAL DE USUARIO

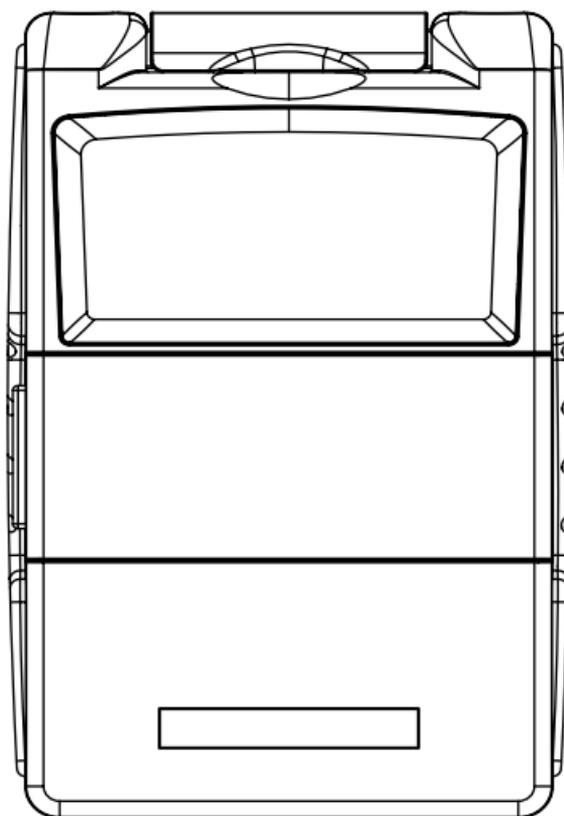

Estimulador
R-C1011

ESTIMU07

LISTA DE CONTENIDO

1. Prólogo	1
2. Conociendo su dispositivo	3
3. Instrucciones de funcionamiento	7
4. Instrucciones de uso	12
5. Limpieza y Mantenimiento	20
6. Resolución de problemas	21
7. Almacenamiento	23
8. Eliminación	24
9. Garantía	25

1. PRÓLOGO

Introducción

El dispositivo R-C101I es un estimulador TENS de salida de doble canal. Antes de usar, lea atentamente todas las instrucciones de este manual de usuario y guárdelo para uso futuro.

El estimulador TENS pertenece al grupo de los sistemas de estimulación eléctrica. Tiene una función básica: TENS (estimulación nerviosa eléctrica transcutánea).

Función del estimulador TENS: El dispositivo tiene 12 programas (B (Explosión), N (Normal), M (Modulación) SD1 (Fuerza Duración) SD2 y 7 programas preestablecidos) y aplica corrientes eléctricas en el rango de baja frecuencia para terapia. Cada programa controla los impulsos eléctricos generados, su intensidad, frecuencia y ancho de pulso.

Basado en simular los pulsos naturales del cuerpo, el mecanismo de los equipos de estimulación eléctrica es crear impulsos eléctricos que se transmiten transcutáneamente a los nervios o fibras musculares a través del electrodo. La intensidad del canal dual se puede ajustar de forma independiente y aplicarse individualmente a una parte del cuerpo. Este dispositivo de doble canal se puede utilizar con cuatro piezas de electrodos, lo que le permite estimular un grupo muscular simultáneamente con una amplia selección de programas estándar. El pulso eléctrico se transmite primero al tejido, luego afecta la transmisión de la estimulación en los nervios y los tejidos musculares en las partes del cuerpo.

1.2 Antecedentes médicos

1.2.1 SOBRE EL DOLOR

El dolor es una señal importante en el sistema de alerta del cuerpo humano. Nos recuerda que algo anda mal, sin lo cual, las condiciones anormales pueden pasar desapercibidas, causando daños o lesiones en partes vitales de nuestro cuerpo. Aunque el dolor es una señal de advertencia necesaria de un trauma o un mal funcionamiento del cuerpo, la naturaleza puede haber ido demasiado lejos en su diseño.

Aparte de su función en el diagnóstico, el dolor persistente de larga duración tiene un propósito inútil.

El dolor no ocurre hasta que el mensaje codificado viaja al cerebro donde se decodifica, analiza y reacciona desde el área lesionada a lo largo de los pequeños nervios que conducen a la médula espinal. Allí, el mensaje se transmite a diferentes nervios que viajan por la médula espinal hasta el cerebro. Luego se interpreta el mensaje de dolor, se hace referencia a él y se siente el dolor.

1.2.2 ¿QUÉ ES TENS?


TENS (estimulación nerviosa eléctrica transcutánea) es eficaz para aliviar el dolor. Se usa a diario y está clínicamente probado por fisioterapeutas, cuidadores y atletas de élite de todo el mundo. Las corrientes TENS de alta frecuencia activan los mecanismos de inhibición del dolor del sistema nervioso. Los impulsos eléctricos de los electrodos, colocados en la piel sobre o cerca del área del dolor, estimulan los nervios para bloquear las señales de dolor al cerebro, lo que hace que el dolor pase desapercibido. Las corrientes TENS de baja frecuencia facilitan la liberación de endorfinas, los analgésicos naturales del cuerpo.

2. CONOCIENDO SU DISPOSITIVO


2.1 Accesorios

No.	Descripción	Cantidad
1	Estimulador TENS	1pza
2	Almohadilla de electrodo (40mm×40mm)	4pzs
3	Alambres de electrodos	2pzs
4	Batería de 9 voltios	1pza
5	Manual de Usuario	1pza


2.2 Pantalla LCD

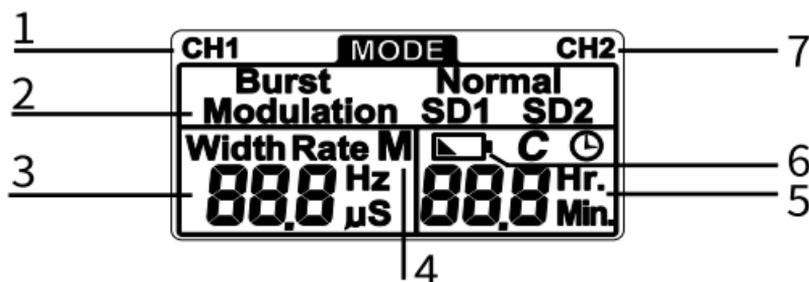


No.	Descripción de la Función	No.	Descripción de la Función
1	Icono del Canal 1	5	Tiempo de tratamiento
2	Modo de tratamiento	6	Icono de batería baja
3	Programas de ancho de pulso, frecuencia de pulso y P01-P07	7	Icono del Canal 2
4	Icono de memoria		

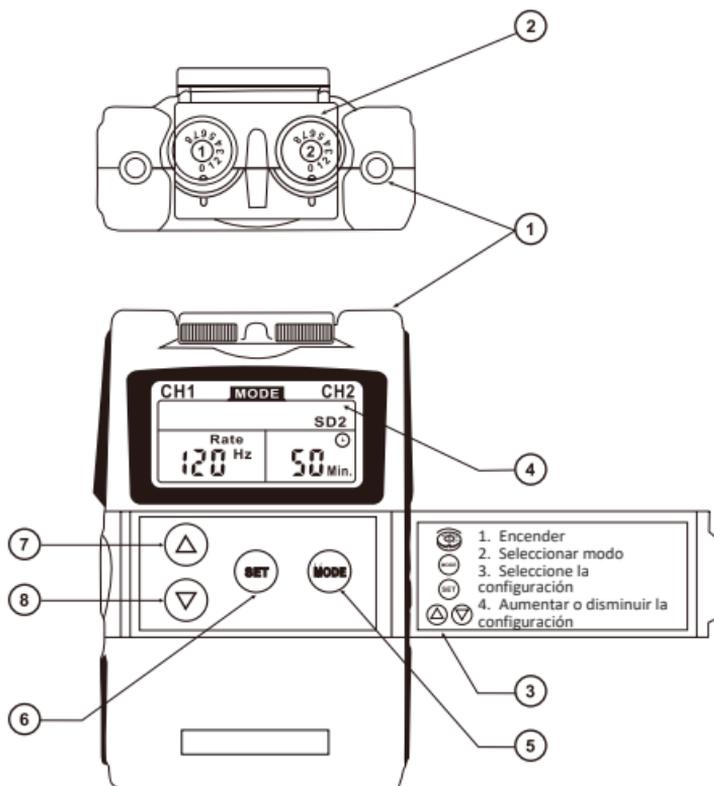

PARTE FRONTAL

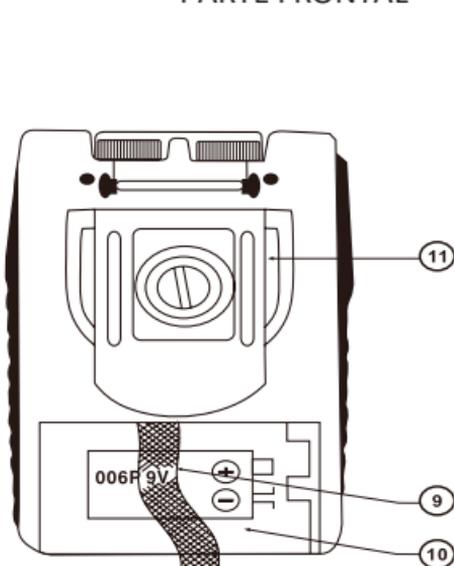

PARTE TRASERA

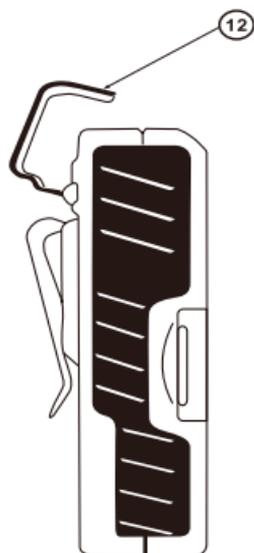


LATERAL

2.3 Ilustración del dispositivo


No.	Descripción
1	Conector de plomo
2	Control de intensidad (interruptor ENCENDIDO/ AÁGADO)
3	Cubierta de panel
4	Pantalla de cristal líquido
5	Control de modo
6	Establecer control
7	Control de aumento
8	Control de disminución
9	Tira de batería
10	Caja de batería
11	Pinza de cinturón
12	Protector de caja

Las formas de onda de los 5 modos de estimulación son las siguientes.


1. Explosión

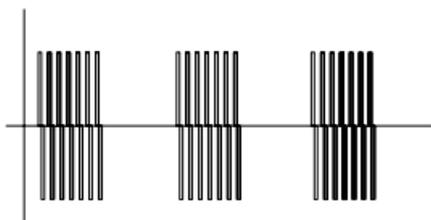


2. Normal

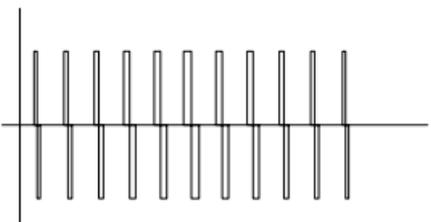


3. Modulación

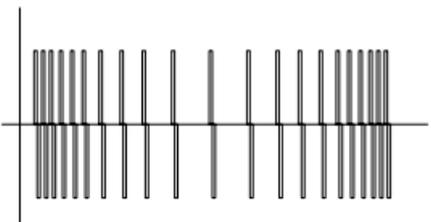

4. SD1 (Fuerza-Duración)

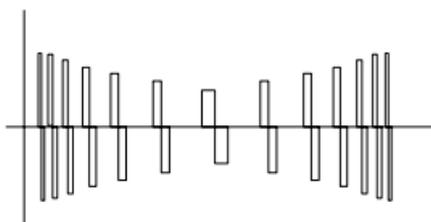

5. SD2 (Fuerza-Duración)

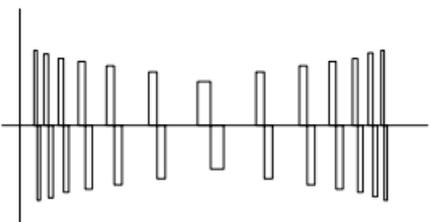


3. INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

3.1 Batería

3.1.1 Revisar/ Reemplazar baterías

Abra la tapa de la batería, inserte una batería de 9 voltios en el compartimiento. Asegúrese de que está instalando las baterías correctamente. Asegúrese de colocar las baterías de acuerdo con las marcas de terminal positivo (+) y terminal negativo (-) en el compartimiento de la batería del dispositivo.

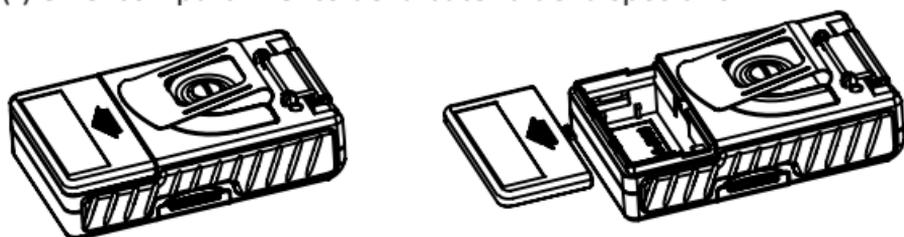

3.1.2 Eliminación de la batería




Las pilas usadas no pertenecen a la basura doméstica. Deseche la batería siguiendo las normas vigentes. Como consumidor, tiene la obligación legal de devolver la batería gastada a la Papelera de reciclaje.

1. Si se tragó accidentalmente una batería, ¡busque asistencia médica de inmediato!
2. En caso de fuga de la batería, evite el contacto con la batería a través de la piel, los ojos y las membranas mucosas. Una vez que ocurra, lave la parte en contacto con abundante agua limpia y comuníquese con su médico de inmediato.
3. La batería no se puede desmontar, arrojar al fuego ni cortocircuitar.
4. Proteja la batería del exceso de calor; Saque la batería del producto si está gastada o si no la usa durante mucho tiempo. Esto puede evitar que el dispositivo se dañe debido a la fuga de la batería.

5. Reemplace todas las baterías simultáneamente.
6. Siempre reemplace el dispositivo con el mismo tipo de batería.

3.2 Conectar las almohadillas de los electrodos a los cables de los electrodos

Inserte el conector de los cables del electrodo en el conector del electrodo. Asegúrese de que estén correctamente conectados para garantizar el buen funcionamiento. Por favor refiérase a la imagen.

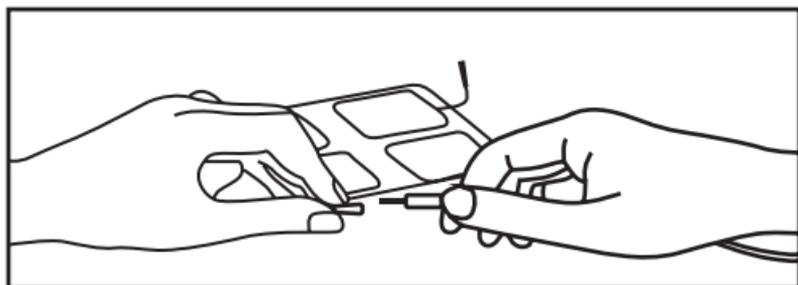

3.3 Conectar los cables de los electrodos al dispositivo

Antes de continuar con este paso, asegúrese de que el dispositivo esté completamente apagado.

Sostenga la parte aislada del conector del cable del electrodo e inserte el enchufe en el receptáculo en la parte superior del dispositivo principal.

Asegúrese de que los cables de los electrodos estén insertados correctamente. El dispositivo tiene dos receptáculos de salida controlados por el Canal 1 y el Canal 2 en la parte superior de la unidad. Puede optar por utilizar un canal con un par de cables de electrodos o ambos canales con dos pares de cables de electrodos. El uso de ambos canales le da al usuario la ventaja de estimular dos áreas diferentes al mismo tiempo.


3.4 Electrodo

3.4.1 Opciones de electrodos

Los electrodos deben reemplazarse de forma rutinaria cuando comienzan a perder su adhesividad. Si no está seguro de las propiedades adhesivas de sus electrodos, solicite nuevos electrodos de repuesto. Los electrodos de reemplazo se deben volver a ordenar bajo el consejo de su médico o del fabricante del dispositivo para garantizar la calidad adecuada. Siga los procedimientos de aplicación descritos en el empaque de los electrodos cuando use los nuevos electrodos de reemplazo para mantener una estimulación óptima y evitar la irritación de la piel.

3.4.2 Coloque los electrodos sobre la piel







Coloque el electrodo en la parte del cuerpo que necesita tratamiento, de acuerdo con las instrucciones de este manual de usuario. Limpie la piel antes de usar y asegúrese de que la piel y el electrodo se conecten bien.














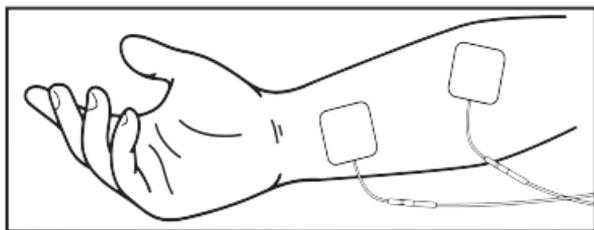


3.4.3 Colocación de electrodos

R-C101I es un tipo de estimulador OTC, adecuado para uso doméstico. Solo tiene que usar de acuerdo al manual de usuario, coloque el electrodo en la posición donde sienta dolor. Realice ejercicio, tratamiento y ajuste en función de sus propias necesidades.

Posición de colocación de electrodos bajo programas TENS

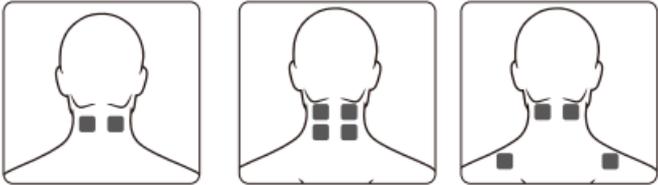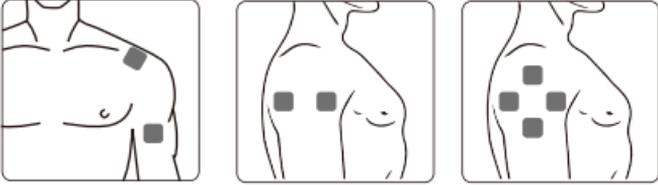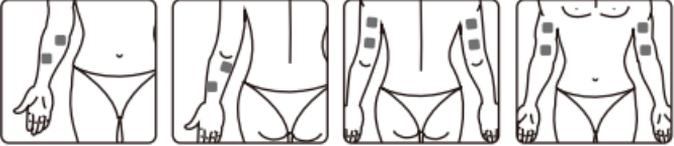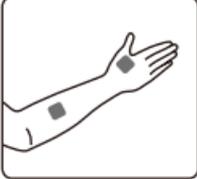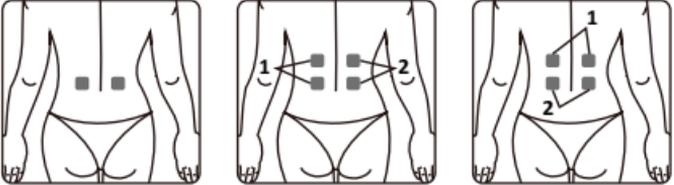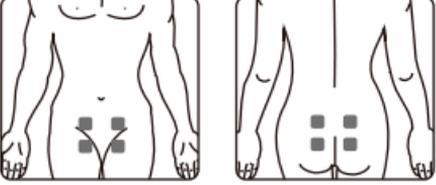Cuello				
Hombros				
Brazos				
Mano				
Espalda				
Abdomen				
Cadera				
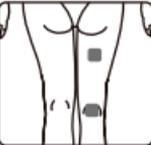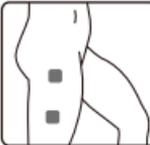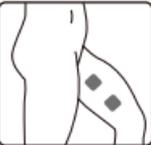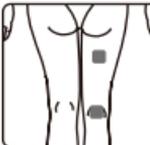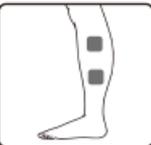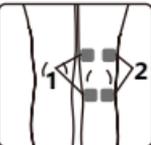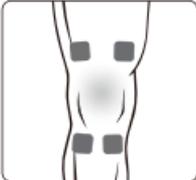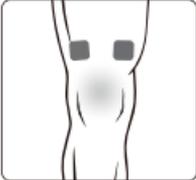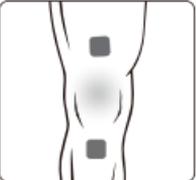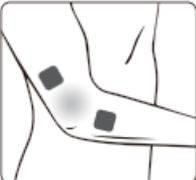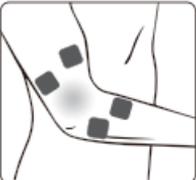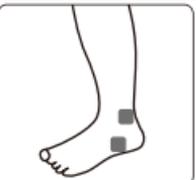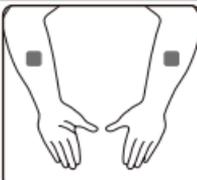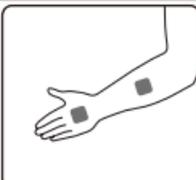
<p>Pierna</p>				
				
<p>Pie</p>				
<p>Articulación (Rodilla)</p>				
<p>Articulación (Codo)</p>				
<p>Articulación (Tobillo)</p>				
<p>Articulación (Muñeca)</p>				


4. INSTRUCCIONES DE USO

4.1 Interruptor de encendido/apagado y controles de intensidad:

Si ambos controles están en la posición de apagado, el dispositivo está apagado. Al girar los controles en el sentido de las agujas del reloj, se enciende el canal correspondiente y el indicador de alimentación (CH1 o CH2) aparecerá en la pantalla LCD. La intensidad de la corriente de los impulsos transmitidos a los electrodos aumenta aún más cuando el control se gira en el sentido de las agujas del reloj.


Para reducir la cantidad de corriente o apagar, gire el control en sentido contrario a las agujas del reloj hasta el ajuste requerido o la posición de apagado.

Los controles están protegidos por una cubierta para evitar cambios de intensidad involuntarios.

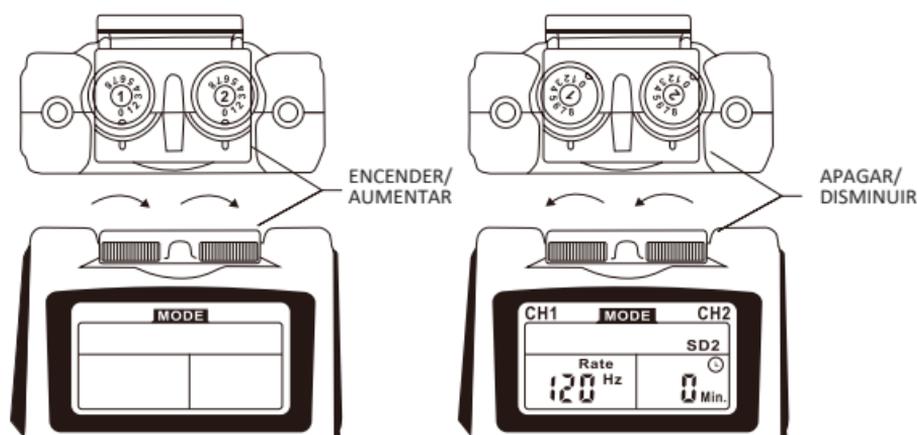



4.2 Conector de cable

La conexión de los electrodos se realiza con los dos hilos conductores. El dispositivo debe estar apagado antes de conectar los cables. Ambos controles de intensidad deben estar en la posición de apagado. Los electrodos deben colocarse firmemente sobre la piel.

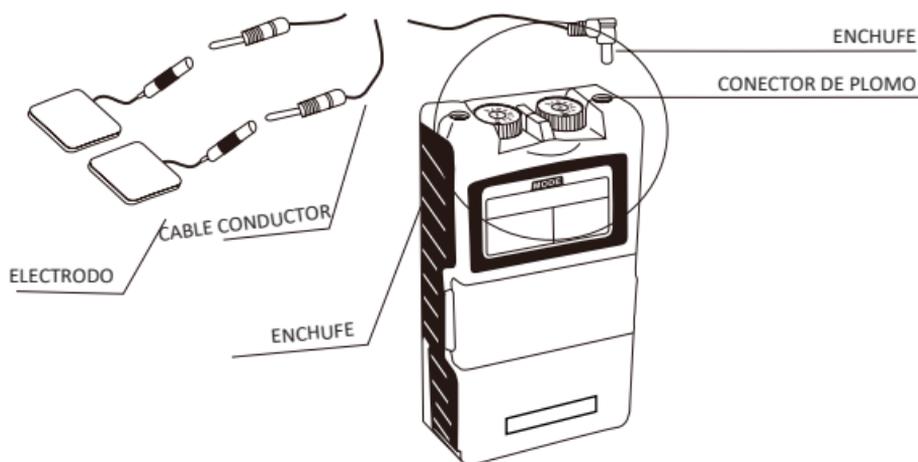

4.3 Control de modo MODE

Hay 5 modos y 7 modos preestablecidos disponibles: modos preestablecidos Explosión, Normal, Modulación, SD1, SD2 y P01-P07. El modo terapéutico se puede seleccionar presionando el control "MODO".

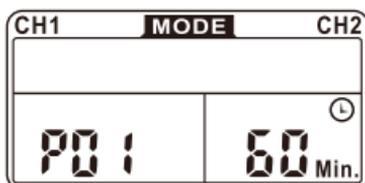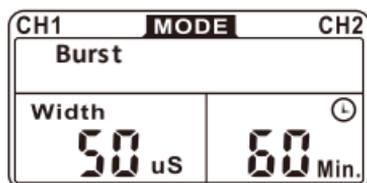

4.4 Control de configuración SET

Presionando el botón "Establecer" se puede ingresar el valor de configuración a realizar. Puede comenzar a configurar el valor presionando los controles de "aumentar" y "disminuir" cuando el valor parpadea.

4.5 Control de incrementos △

Este botón controla el aumento de la configuración. Cuando presiona este botón, el parámetro aumenta.

4.6 Control de disminución

Este botón controla la disminución del parámetro. Al presionar este botón, el parámetro disminuirá.

4.7 Temporizador

La unidad: tiene un temporizador de 1- 60 minutos y Continuo. Se puede ajustar presionando los controles "Establecer" e "Aumentar" o "Disminuir". El tiempo de tratamiento hará una cuenta regresiva automáticamente de un minuto a un minuto. Su salida se apagará cuando se acabe el tiempo.

4.8 Indicador de batería baja

Aparecerá un indicador de batería baja en la pantalla cuando sea necesario reemplazar la batería. La unidad puede seguir funcionando durante algunas horas más dependiendo en el nivel de intensidad de los ajustes.


4.9 Pasos para establecer un nuevo programa

a. Encienda la intensidad

Después de que los electrodos estén colocados firmemente sobre la piel y los cables conductores estén enchufados en el enchufe del dispositivo, gire el control de encendido/apagado en el sentido de las agujas del reloj. La pantalla se iluminará.


b. Seleccione un modo

Seleccione un modo presionando el control "MODO". El modo que seleccione aparecerá en la parte superior de la pantalla. Hay 5 modos ajustables de su opción, que incluyen - Explosión, Normal, Modulación, SD1 y SD2.

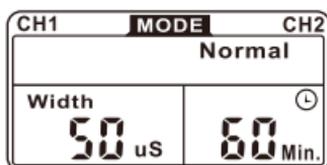


c. Establecer ancho de pulso

El ancho de pulso es ajustable de 50 μ s a 300 μ s. Presione el control "Establecer" para ingresar a este menú, luego presione "Aumentar" o "Disminuir" para ajustar la configuración. Si no se dan instrucciones sobre el ancho del pulso durante la terapia, establezca el control en la configuración sugerida de 70-120 μ s.

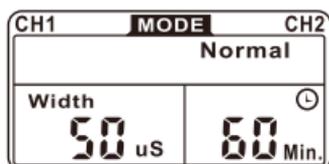



d. Establecer la frecuencia del pulso

La frecuencia del pulso es ajustable de 2 Hz a 150 Hz. Presione el control "Establecer" para ingresar a este menú, luego presione "Aumentar" o "Disminuir" para ajustar la configuración. A menos que se indique lo contrario, gire el control de frecuencia del pulso a la configuración de 70-120 Hz.

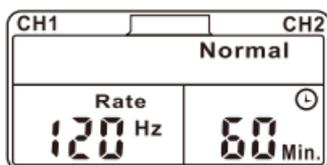

e. Establecer temporizador

Presione "Establecer" para ingresar a esta configuración. El tiempo de tratamiento es ajustable de 1 a 60 minutos o Continuar. Presione el control "Aumentar" o "Disminuir" para ajustar la configuración. Sus configuraciones se almacenarán en esta unidad eternamente a menos que se ajusten nuevamente. Puede configurar el temporizador en modo "Continuo" presionando el control de "Aumentar" cuando muestra 60 minutos.

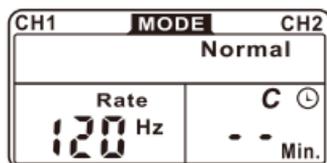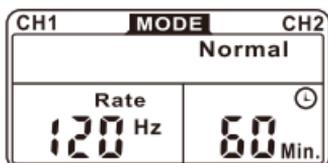



Continuo

4.10 Medidor de cumplimiento del paciente

Esta unidad puede almacenar 60 juegos de registros de operación. Se puede almacenar el tiempo total de tratamiento hasta 999 horas.



Verificar y Eliminar Registros Individuales

Presione el control "Modo" y encienda la alimentación simultáneamente. La pantalla LCD mostrará el número de registros y el tiempo de operación. Presione el botón "Aumentar" y "Disminuir" para verificar cada registro. Para eliminar un registro, presione el control "Establecer" durante 3 segundos.

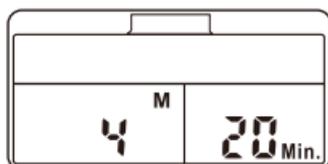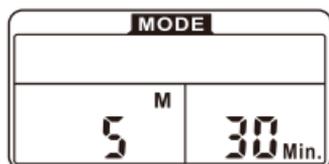

Comprobar y eliminar registro acumulativo

En el menú de registros individuales, presione el control "Modo" para cambiar al menú de registro acumulativo. Presione el control "Establecer" primero, luego presione el control "Modo" simultáneamente durante 3 segundos y todos los registros se eliminarán seguido de un pitido.

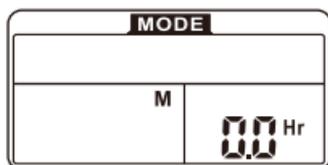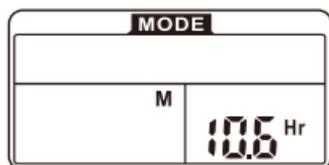

4.11 Revisar/Reemplazar la batería:

Con el tiempo, para garantizar la seguridad funcional de TENS, es necesario cambiar la batería.

1. Asegúrese de que ambos controles de intensidad estén en la posición de apagado.

2. Deslice la tapa del compartimiento de la batería y ábrala.
3. Retire la batería del compartimiento.
4. Inserte la batería en el compartimiento. Tenga en cuenta la polaridad indicada en la batería y en el compartimiento.
5. Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de la batería y presione para cerrar.



Aviso de baterías:

1. Las baterías pueden ser fatales si se tragan. Por lo tanto, mantenga las pilas y el producto fuera del alcance de los niños. Si se traga una batería, vaya a un hospital inmediatamente.
2. Si hay una fuga de batería, evite el contacto con la piel, los ojos y las membranas mucosas. Enjuague inmediatamente los puntos afectados con abundante agua limpia y comuníquese con un médico de inmediato.
3. Las baterías no deben cargarse, desmontarse, arrojarse al fuego ni cortocircuitarse.
4. Proteja las baterías del exceso de calor. Saque las baterías del dispositivo si están gastadas o en caso de que ya no las vaya a usar. Esto evita daños causados por fugas de pilas.

4.12 Uso de almohadillas de electrodos

1. El electrodo solo se puede conectar con el estimulador TENS. Asegúrese de que el dispositivo esté apagado cuando coloque o retire los electrodos.

2. Si desea cambiar la posición del electrodo durante la aplicación, apague primero el dispositivo.
3. El uso de electrodos puede provocar irritaciones en la piel. Si experimenta tales irritaciones en la piel, p. enrojecimiento, ampollas o picazón, deje de usarlos. No utilice el estimulador TENS de forma permanente en la misma parte del cuerpo, ya que esto también puede provocar mayores irritaciones en la piel.
4. Las almohadillas de electrodos son privadas y están diseñadas para uso de una sola persona. Por favor, evite usarlos por diferentes personas.
5. El electrodo debe conectarse completamente a la superficie de la piel para evitar puntos calientes, que pueden provocar quemaduras en la piel.
6. No utilice los electrodos durante más de aprox. 10 veces, ya que la conexión entre los electrodos y la piel se deteriora con el tiempo.
7. La fuerza adhesiva de los electrodos depende de las propiedades de la piel, las condiciones de almacenamiento y el número de aplicaciones. Si las almohadillas de los electrodos ya no se adhieren por completo a la superficie de la piel, reemplácelas por unas nuevas. Vuelva a colocar las almohadillas de los electrodos en la lámina protectora después de usarlas y guárdelas en la bolsa de almacenamiento para evitar que se sequen. Esto retiene la fuerza adhesiva durante un período más largo.

4.13 ¿Dónde coloco los electrodos?

1. Cada persona reacciona de manera diferente a la estimulación nerviosa eléctrica. Por lo tanto, la colocación de los electrodos puede desviarse del estándar. Si la aplicación no tiene éxito, comuníquese con su médico para averiguar qué técnicas de colocación son mejores para usted.
2. No utilice electrodos adhesivos de un tamaño inferior a los que adjuntó el fabricante original. De lo contrario, la densidad de corriente puede ser demasiado alta y causar lesiones.
3. El tamaño de las almohadillas adhesivas no se puede cambiar, p. no corte partes de ellas.
4. Asegúrese de que la región que irradia el dolor esté rodeada por los electrodos. En caso de grupos musculares dolorosos, conecte los electrodos de tal manera que los músculos afectados también queden cubiertos por los electrodos.

Consejos de uso para TENS:

Si no siente ninguna molestia durante el tratamiento, le recomendamos que utilice el dispositivo hasta que finalice la sesión. Normalmente, el alivio del dolor ocurre después de 5 a 10 minutos de tratamiento;

Si siente molestias durante el tratamiento, puede pausar la sesión o disminuir la intensidad de la salida. Normalmente, recomendamos 1~2 tratamientos por día y una semana como período de tratamiento;

Después de un período de tratamiento, si no se logra el alivio del dolor o el dolor empeora, consulte a su médico.

5. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Cumpla totalmente con los siguientes requisitos de mantenimiento diario necesarios para asegurarse de que el dispositivo esté intacto y garantizar su rendimiento y seguridad a largo plazo.

5.1 Limpieza y cuidado del dispositivo

5.1.1 Extraiga los electrodos del estimulador, limpie el dispositivo con un paño suave ligeramente húmedo. En caso de una mayor acumulación de suciedad, también puede aplicar un detergente suave.

5.1.2 No exponga el estimulador TENS a la humedad y no sostenga el estimulador TENS debajo del agua corriente, ni lo sumerja en agua u otros líquidos.

5.1.3 El estimulador TENS es sensible al calor, no debe ser expuesto a la luz solar directo ni lo coloque sobre superficies calientes.

5.1.4 Por razones de higiene, cada usuario debe utilizar su propio juego de electrodos.

5.1.5 No utilice limpiadores químicos ni agentes abrasivos para limpiar.

5.1.6 Asegúrese de que no penetre agua en la máquina. Si esto sucediera, vuelva a utilizar el dispositivo solo cuando esté completamente seco.

5.1.7 No limpie el dispositivo durante el tratamiento. Asegúrese de que el dispositivo esté apagado antes de limpiarlo.

5.2 Mantenimiento

5.2.1 El fabricante no autorizó agencias de mantenimiento en el exterior. Si su dispositivo tiene algún problema, póngase en contacto con el distribuidor. El fabricante no será responsable de los resultados del mantenimiento o las reparaciones realizadas por personas no autorizadas.

5.2.2 El usuario no debe intentar reparar el dispositivo ni ninguno de sus accesorios. Póngase en contacto con el distribuidor para la reparación.

5.2.3 No se permite la apertura del equipo por parte de agencias no autorizadas y terminará cualquier reclamo de garantía.

Cada producto en fabricación ha sido inspeccionado a través de la validación sistemática. El rendimiento es estable y no necesita realizar calibración y validación.

Si su producto no puede alcanzar el rendimiento esperado y la función básica ha cambiado durante el uso normal, comuníquese con el minorista.

6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si ocurre algún mal funcionamiento durante el uso del dispositivo, verifique si los parámetros están configurados adecuadamente para la terapia y ajuste el control correctamente. Consulte la siguiente tabla:

Problema	Causas comunes	Solución
Sin pantalla después de reemplazar la batería	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hay un cuerpo extraño en el compartimiento de la batería. 2. La batería se ha agotado o se ha instalado de forma opuesta. 3. Hay un cuerpo extraño en la interfaz de la batería. 4. La batería no es del modelo correcto o algo va mal con la interfaz de la batería. 5. Restablecimiento de excepción. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revise y limpie el compartimiento. 2. Reemplace la batería nueva o instale la batería correctamente. 3. Verifique y limpie la interfaz. 4. Reemplace la batería con el modelo correcto.
Sin sensación de estimulación	<ol style="list-style-type: none"> 1. El electrodo no se conecta bien a la piel. 2. Si la conexión entre el electrodo se conecta bien al estimulador. 3. La batería está agotada. 4. La piel está demasiado seca. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Comprobar y volver a pegar en la piel. 2. Verifique la conexión. 3. Reemplace la batería 4. Limpie el electrodo y la piel con un paño de algodón húmedo.
Parada automática en el tratamiento	<ol style="list-style-type: none"> 1. El electrodo pierde conexión con la piel. 2. Si la batería está agotada. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifique y coloque el electrodo correctamente sobre la piel. 2. Reemplace la batería.

<p>Erupción o cosquilleo en la piel se produce en el tratamiento</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. El tiempo de tratamiento dura demasiado. 2. El electrodo no se adhiere bien a la piel. 3. La interfaz de los electrodos está sucia o seca. 4. La piel es sensible al electrodo. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realice el tratamiento una vez al día y acorte el tiempo de tratamiento. 2. Revisar y pegar bien el electrodo. 3. Limpie el electrodo con un paño de algodón húmedo antes de usarlo. 4. Revise su historial de alergias. Cambie el lugar de pegado o acorte el tiempo de tratamiento. Si su piel es demasiado sensible, debe interrumpir el tratamiento o acudir al médico.
----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. ALMACENAMIENTO

7.1 Almacenamiento de las almohadillas de electrodos y los cables conductores

1. Apague el dispositivo y retire los cables conductores de la unidad.
2. Retire los electrodos de su cuerpo y desconecte los cables conductores de los electrodos.
3. Coloque los electrodos en el film de plástico y luego guárdelos en el paquete sellado.
4. Envuelva los cables conductores y guárdelos en el paquete sellado.

7.2 Almacenamiento de la unidad

1. Vuelva a colocar la unidad, los electrodos, los cables conductores y el manual en el estuche de transporte. Guarde la caja en un lugar fresco y seco, $-10\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 55\text{ }^{\circ}\text{C}$; 10% ~ 90% de humedad relativa.
2. No lo guarde en lugares a los que los niños puedan acceder fácilmente.
3. Cuando no esté en uso durante un período prolongado, retire la batería antes de guardarla.

8. ELIMINACIÓN



Las pilas gastadas no pertenecen a los residuos domésticos. Eliminación de la batería de acuerdo con la normativa vigente. Como consumidor, tiene la obligación de desechar correctamente las baterías.

Consulte a su autoridad municipal o a su distribuidor para obtener información sobre la eliminación.

Al final del ciclo de vida del producto, no tire este producto a la basura doméstica normal, sino llévelo a un punto de recogida para el reciclaje de equipos electrónicos. Los equipos eléctricos y electrónicos obsoletos pueden tener efectos potencialmente dañinos para el medio ambiente. La eliminación incorrecta puede hacer que las toxinas se acumulen en el aire, el agua y el suelo y pongan en peligro la salud humana.

9. GARANTÍA

Póngase en contacto con su distribuidor o el centro del dispositivo en caso de una reclamación bajo la garantía. Si tiene que devolver la unidad, adjunte una copia de su recibo con una declaración clara de la descripción del defecto.

Los términos de la garantía son los siguientes:

1. El período de garantía de este dispositivo es de 1 año a partir de la fecha de compra. En caso de reclamación de garantía, la fecha de compra debe probarse mediante el recibo de compra o la factura.
2. Las reparaciones bajo garantía deben estar dentro del período de garantía, ya sea para el dispositivo o para las piezas de repuesto.
3. Los siguientes casos están excluidos de la garantía
 - Todos los daños que surjan debido a una operación incorrecta, como por ej. incumplimiento de las instrucciones del usuario.
 - Todos los daños debidos a reparaciones o manipulaciones por parte del cliente o terceros no autorizados.
 - Daños que hayan surgido durante el transporte desde el fabricante hasta el consumidor o el centro de servicio.
 - Accesorios que están sujetos al uso y desgaste normal.
 - Daños en el dispositivo debido al desmontaje privado de dispositivos.
4. Se excluye la responsabilidad por pérdidas consecuentes directas o indirectas causadas por la unidad incluso si el daño a la unidad se acepta como reclamo de garantía.

**SERVI
TECH**

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar