

## MUCHAS GRACIAS

Estamos encantados de que haya elegido este producto y esperamos que lo aproveche al máximo. Si tiene alguna pregunta o comentario sobre su nuevo producto, simplemente póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente.

¡Disfrute de su nuevo producto!



## INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar el masajeador de pulso electrónico con pantalla táctil. Para permitirle operar correctamente este producto, lea detenidamente este manual y consérvelo bien después de leerlo para referencia futura.

Nuestro masajeador de pulso electrónico con pantalla táctil envía impulsos electrónicos a los músculos cansados y adoloridos a través de sus electrodos. Estos impulsos imitan las señales que provienen del sistema nervioso central para desencadenar contracciones musculares, que se pueden usar para una variedad de propósitos, como aumentar la resistencia, complementar las rutinas de ejercicio o simplemente relajarse.

Nuestro masajeador de pulso electrónico con pantalla táctil es portátil, compacto y elegante. Puede ser útil para aliviar molestias y dolores menores en varias partes del cuerpo, como la cintura, los hombros, las articulaciones, las manos y los pies. El dispositivo es especialmente útil para aliviar la rigidez de los músculos del cuello y el dolor causado por el ejercicio intenso. El uso responsable y adecuado puede generar una variedad de beneficios para usted y su bienestar.

## MANTENIMIENTO

### Dispositivo

1. Utilice un paño ligeramente humedecido para limpiar el dispositivo, asegurándose de limpiarlo suavemente.
2. Asegúrese de que el dispositivo esté apagado antes de intentar limpiarlo.
3. No sumerja ni permita un contacto excesivo entre el dispositivo y el agua.
4. Almacenar las almohadillas correctamente mejorará su longevidad.


### Almohadillas

1. Asegúrese de que ambas almohadillas no se superpongan y asegúrese de que su piel esté libre de suciedad, aceite o loción.
2. La aplicación de unas gotas de agua antes y después del uso aumentará la longevidad de las almohadillas.
3. Coloque las almohadillas en el soporte para almohadillas o coloque un trozo de film en el lado adhesivo de la almohadilla para mantener la humedad del gel.

## CONFIGURAR

Desembale la caja del producto, saque el producto y los accesorios y conecte los electrodos al dispositivo.

1. El dispositivo tiene dos canales A y B. Asegúrese de qué canales (canal A o B o ambos) desea usar antes de conectar los cables al dispositivo.
2. Colóquese las almohadillas en la piel antes de encender el dispositivo. Use al menos un par de almohadillas en el mismo cable del electrodo; una sola almohadilla no funcionará.

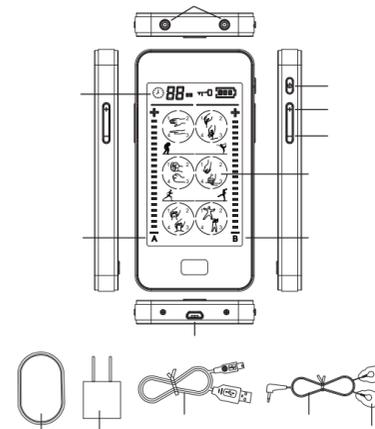

1. Salida
2. Puerto USB
3. Tiempo
4. Interruptor para almohadillas
5. Intensidad +
6. Intensidad -
7. Selección de modo
8. Intensidad A
9. Intensidad B
10. Tablero de recolección para almohadillas
11. Cargador
12. Cable USB
13. Almohadillas de masaje
14. Alambre de electrodo

## LISTA DE MODOS

Hay 24 modos de masaje:

El modo 1 contiene formas de onda de tapping, scrapping, body building, knocking;  
El modo 2 contiene acupuntura, terapia de pies, formas de onda de punto gatillo Lomi lomi;  
El modo 3 contiene huelga, reflexología, Tha chi, formas de onda de masaje nuge;  
El modo 4 contiene formas de onda de amasado, mariposa y estiramiento profundo de shiatsu;  
El modo 5 contiene formas de onda ventosas, deportivas, tailandesas suecas;  
El modo 6 contiene formas de onda frotadas, variadas, escalonadas y automáticas. Aumente la intensidad cuando cambie al nuevo modo porque volverá a ser la más baja automáticamente.

## INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Conecte las almohadillas al cable enganchándolas y luego retire el film protector.
2. Coloque las almohadillas en el área deseada y conecte los cables en uno de los puertos del dispositivo (Canal A o Canal B). Para un alivio adicional, use un par de almohadillas adicionales enchufadas en el otro puerto en la misma área. Asegúrese de que ambas almohadillas no se superpongan y de que su piel esté libre de suciedad, aceite o loción.
3. Presione en el lado derecho del dispositivo. La unidad ahora está activada. Las manecillas parpadeantes en la pantalla LCD apuntarán automáticamente al modo 1.
4. Toque el área de modo para seleccionar diferentes modos. cada círculo incluye 4 modos de masaje.
5. Presione el botón "+" o toque el icono "+" en la pantalla para fortalecer la potencia de salida, presione el botón "-" o toque el icono "-" en la pantalla para reducir la potencia de salida, en total 20 niveles de intensidad. La configuración de intensidad cambiará a la configuración más baja al seleccionar un nuevo modo. La potencia de salida elegida depende de la sensación de comodidad.
6. Presione el botón en el medio del dispositivo para bloquear la pantalla LCD. Donde se muestra un icono de llave en la parte superior de la pantalla, presione este botón nuevamente para desbloquear el dispositivo.
7. Para ajustar el temporizador, presione el icono .

Hay disponibles temporizadores de 10, 20, 30, 40, 50 y 60 minutos. El tiempo predeterminado es de 20 minutos.

8. Apague el dispositivo.
9. Qúitese las almohadillas de la piel. Retire con cuidado las almohadillas de la piel tirando de la esquina de la almohadilla, luego vuelva a colocarlas en el soporte para almohadillas provisto o en el film.

## CONSEJOS Y MANTENIMIENTO

Se sugiere que no use el masajeador en un área determinada de la piel durante más de 20 minutos 2 veces al día. Consulte con su médico para usos más largos o más frecuentes.  
Comience desde la intensidad más baja y ajuste gradualmente la intensidad a un nivel cómodo en una escala del 1 al 20. El buen cuidado de la piel es importante para garantizar un uso cómodo del dispositivo. Asegúrese de que el sitio de tratamiento esté limpio de suciedad y loción corporal.  
Mantener el electrodo en su estuche después de su uso extenderá su vida útil. El electrodo es desechable y debe ser reemplazado cuando pierde su adhesivo.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si encuentra problemas con su dispositivo, consulte esta guía de solución de problemas. Si tiene alguna otra pregunta, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente.

| a   | Causa Posible  | Solución   |
|---|--|--|
| Una almohadilla se siente más fuerte que la otra                    | Esto es normal. Diferentes áreas de su cuerpo reaccionarán de manera diferente | No hay que hacer nada. Asegúrese de que las almohadillas estén húmedas y hagan buen contacto.  |
| La intensidad se siente muy débil, incluso en los ajustes más altos | Las almohadillas no están unidas firmemente al cuerpo                          | Fije ambas almohadillas firmemente a la piel   |
|   | Las almohadillas no están unidas firmemente al cuerpo                          | Despegue el film de la superficie adhesiva de las almohadillas   |
|   | Los films transparentes todavía están en las almohadillas.                     | No permita que las almohadillas se superpongan   |
| La piel se pone roja o irritada                                     | El cable no está correctamente conectado a la unidad                           | Conecte el cable de forma segura en el conector  |
|   | La intensidad parece disminuir con el tiempo al mismo nivel                    | Aumente el nivel de intensidad a medida que la sensación se vuelve menos efectiva  |
|   | La capacidad de la batería es baja   | Cargue la batería  |
| Sin fuente de alimentación; no se muestra nada en la pantalla LCD   | La superficie adhesiva de las almohadillas está sucia o seca                   | Lave la superficie adhesiva de las almohadillas suavemente con las yemas de los dedos durante aproximadamente 3s con agua corriente lenta. |
|   | El tiempo de terapia es demasiado largo o la intensidad es demasiado alta      | Reduzca la duración del uso o la intensidad  |
| Sin estimulación; pantalla LCD en condiciones normales              | La superficie de la almohadilla del electrodo está desgastada                  | Reemplace la almohadilla del electrodo. Contáctenos  |
|   | La batería está agotada  | Cargue la batería  |
|   | Solo 1 almohadilla se conecta con el cable                                     | Use al menos un par de almohadillas en el mismo cable de electrodo   |

|   |  |  |
|---|--|--|
| Se corta la energía durante el uso                      | La batería está agotada  | Cargue la batería  |
|   | El cable está roto   | Reemplace el cable   |
| Es difícil adherir la almohadilla a la piel             | No se ha quitado el film de la superficie de las almohadillas adhesivas                    | Despegue el film de la superficie adhesiva de las almohadillas |
|   | La almohadilla se aplicó sobre la piel húmeda  | Seque la almohadilla   |
| La superficie adhesiva de la almohadilla no es pegajosa | La superficie adhesiva de la almohadilla está dañada                                       | Reemplace la almohadilla                                       |
|   | Las almohadillas se han deteriorado  | Póngase en contacto con nosotros para su reemplazo             |
|   | Las almohadillas se almacenaron a alta temperatura, alta humedad o luz solar directa, etc. | Reemplace la almohadilla                                       |



## MANUAL DE USUARIO



Electroestimulador  
SM9079

ESTIMU08