


**MANUAL DE USUARIO**




Masajeador Facial  
**LF60**

**LEDMASK3**

**Lista de Partes**

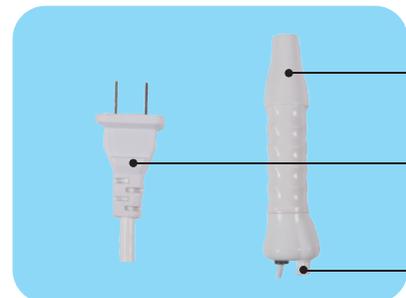

Pieza de mano

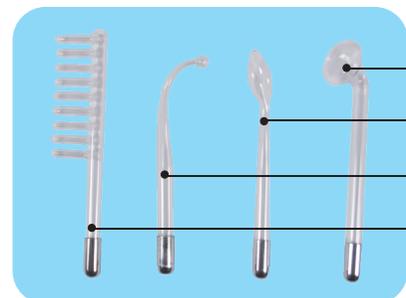

Tubo de vidrio

Salida

Cable de energía

Ajuste de intensidad

Tubo de hongos

Tubo de lengua

Tubo doblado

Tubo de peine

**Instrucciones principales**

La electroterapia de alta frecuencia es un importante instrumento de belleza. Es a través del tubo de electrodo de vidrio que se produce una corriente de alta frecuencia y que se aplica en la cara, por lo que se logra el resultado del tratamiento.

1. Ayuda a calmar los nervios y tiene función analgésica.
2. Produce el ozono para la esterilización, puede ayudar a herir y retener los poros.
3. Mejorar la secreción, el valor del pH, induce a la piel a inclinarse hacia la neutralidad.
4. Acelera la circulación sanguínea y mejora el metabolismo.
5. Tiene la función de antienvjecimiento, antiarrugas y tensor.

**Procedimientos de operación:**

1. Método indirecto:
  - (1). Enrosque el tubo de vidrio en la pieza de mano.
  - (2). Pídale al cliente que sostenga el tubo de vidrio después de aplicar un poco de talco. Encienda la máquina y la electricidad pasará de las manos a todo el cuerpo.
  - (3). Los esteticistas realizan el masaje en la cara de los clientes desde el cuello hasta la barbilla y desde la visera hasta la frente.
  - (4). Ajuste la intensidad a "0". Asegúrese de que la máquina esté apagada y saque el tubo de vidrio de la pieza de mano. Este método es apto para pieles secas y envejecidas.
2. Método directo:
  - (1). Primero aplique crema en la cara y luego, la esteticista sujeta la barra de metal para colocar el tubo de vidrio en la cara del cliente. Encienda la máquina.

(2). Masajee con el tubo de vidrio en forma de "Z" o hélice en la cara del cliente, realice el tratamiento de la siguiente manera, frente - nariz - lado derecho de la cara - mentón - lado izquierdo de la cara - nariz - frente.

(3). Ajuste la intensidad a "0". Asegúrese de que la máquina esté apagada y saque el tubo de vidrio de la pieza de mano. Este método es apto para pieles grasas.

**3. Método Sparkle:**

(1). Cubra los ojos del cliente con un trozo de parche de tela húmeda y toque la cara con el tubo de vidrio en la parte de la inflamación. El tratamiento debe durar menos de 10 segundos.

(2). Es normal que salgan destellos mientras el tubo de vidrio toca la cara.

(3). Ajuste la intensidad a "0". Asegúrese de que la máquina esté apagada y saque el tubo de vidrio de la pieza de mano. Este método se adapta a la piel con dolor, inflamación y heridas.

**4. Método de cuidado del cabello:**

(1). Utilice el peine junto con el pilatorio.

(2). Mueva el tubo del peine en dirección del cabello.

(3). Ajuste la intensidad a "0". Asegúrese de que la máquina esté apagada y saque el tubo de vidrio de la pieza de mano. Este método es para estimular la superficie de la piel, reducir la foliculitis y mejorar el crecimiento saludable del cabello.

**SERVITECH**

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC  
[www.servitech.com.ar](http://www.servitech.com.ar)

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)  
[serviciotecnico@servitech.com.ar](mailto:serviciotecnico@servitech.com.ar)