


# GADNIC

## MANUAL DE USUARIO

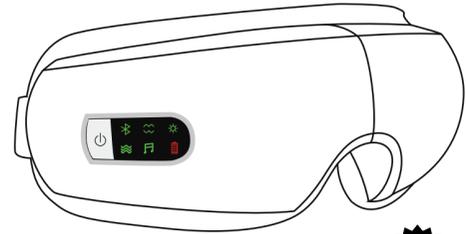

MASAJEADOR DE OJOS BLUETOOTH  
MASAJO23

MASAJO23

### POR FAVOR LEA ESTA INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

Gracias por comprar este masajeador de ojos. Lea atentamente el manual de funcionamiento antes de usarlo y preste especial atención a las cuestiones de seguridad para operar y utilizar este producto correctamente.

Este manual proporciona a los usuarios una forma de funcionamiento segura y eficaz. Guárdelo correctamente después de leerlo para consultarlo en el futuro.

### CONTENIDO

1. Perfil del producto ..... 2
2. Nombre y función de cada parte ..... 3
3. Uso del producto ..... 4
4. Limpieza, mantenimiento y almacenamiento ..... 5
5. Fallas y soluciones ..... 6

1

### INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO

El masajeador de ojos utiliza la tecnología de control de chip de microordenador para todo el control de simulación de la naturaleza humana, la aplicación de presión de aire es un concepto completamente nuevo para el cuidado de los ojos, bajo el control de la presión del aire en el ordenador para una gama completa de músculos alrededor del ojo. presión, vibración y, junto con la función interna y la función de calefacción por infrarrojos lejanos, las sentinas de ácido ocular, el dolor ocular, alivian la fatiga ocular.

#### 1. CARACTERÍSTICAS:

El dispositivo de masaje ocular se puede conectar al teléfono móvil para reproducir música a través de Bluetooth;  
Uso inalámbrico portátil, modo de carga USB;  
Tecnología de control de chip de microordenador de calefacción por infrarrojos a distancia;  
5 técnicas de masaje;  
Tiempo automático de 15 minutos;  
Masaje con bolsa de aire (masaje los músculos alrededor del área de los ojos haciendo coincidir adecuadamente el llenado de aire y la liberación de aire);  
La salida de voltaje de 5 V es más segura, una operación clave es simple y conveniente;  
Nuevo modo de vibración.

#### 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN:

Para los ojos.

2

### CIRCUITO DE CONTROL DE UNA TECLA



### NOMBRE Y FUNCIÓN DE CADA PARTE

#### 1. Operación con un clic

- (1) Mantenga presionada la tecla durante 3 segundos para iniciar el modo integrado (presión de aire + vibración + compresión caliente + música).
- (2) Presione la tecla nuevamente para iniciar el modo de limpieza (presión de aire + compresión caliente + música).
- (3) Continúe presionando la tecla para iniciar el modo de suspensión (presión de aire).
- (4) Continúe presionando la tecla para iniciar el modo de vitalidad (presión de aire + vibración + música).
- (5) Continúe presionando la tecla para iniciar el modo inteligente (compresión en caliente + música).
- (6) Presione el botón durante 3 segundos para apagar la función de la máquina.
- (7) Abra el Bluetooth de su teléfono móvil y busque el nombre de Bluetooth: YBY. Los dispositivos se conectarán automáticamente.


Interruptor de control inteligente

3

### USO DEL PRODUCTO

#### Método de uso

1. Preparación antes del uso
- (1) Saque el masajeador de ojos suavemente
- (2) Coloque el dispositivo de masaje ocular en la posición de los ojos
2. Uso (como se muestra)

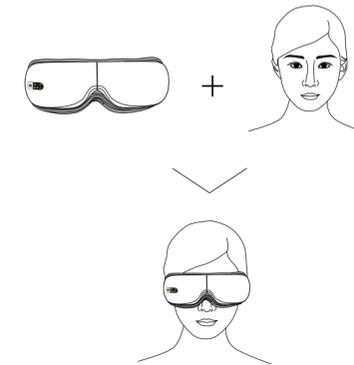


4

### LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

Limpieza, almacenamiento y mantenimiento de productos

1. Limpieza y mantenimiento del producto
- Si el producto está sucio, límpielo con un paño suave y seco.
- Si está particularmente sucio, puede limpiarlo con alcohol medicinal.

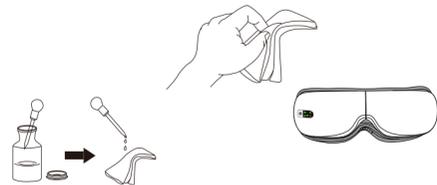

2. Mantener
- Manténgalo seco, ventilado y limpio.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- No desmonte el motor principal sin permiso

5

### FALLAS COMUNES Y SOLUCIONES

#### Incapaz de arrancar:

1. Si la carga de la batería es demasiado baja, cárguela inmediatamente.
2. Protección del host (con electricidad) conecte el cargador, cargue y permita que el host retire automáticamente la protección (cargue durante 5 segundos).
3. La batería no está cargada y el cargador está dañado.
4. La intensidad de la presión es demasiado débil.

**Nota:** todo el trabajo de mantenimiento debe ser realizado por nuestro personal de mantenimiento autorizado.

6

### FALLAS COMUNES Y SOLUCIONES

Falla	Posible causa de falla	Solución
Incapaz de arrancar	Batería baja	Cargue inmediatamente
	Protección de la placa base (con electricidad)	Conecte el cargador para cargar y permita que el host elimine automáticamente la protección (5 segundos después de la carga)
	La batería no está cargada	Reemplazar cargador
	Cargado	Desenchufar el cargador
La presión es demasiado débil	Baja potencia	Cargando
Parche ocular no caliente	Baja potencia	Cargando
	El modelo está mal	Sintonice el patrón correspondiente

7



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC  
www.servitech.com.ar

© 11 6260 1114 (sólo texto)  
serviotecnico@servitech.com.ar