

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

CAMILLA PROFESIONAL
PARA MASAJES



MASAJ22X / MASAJ50X / MASAJ47X / MASAJ11X

Guía de Usuario

Mesa portátil y plegable para masajes

Felicitaciones por la compra de esta mesa de masaje portátil. Su nueva mesa ha sido hábilmente diseñada con altos estándares, utilizando componentes y materiales de alta calidad. Con el uso y cuidado adecuados, como se describe en esta guía del usuario, su mesa debe proporcionar un rendimiento confiable durante mucho tiempo. Para garantizar el uso seguro y correcto de su mesa, tómese un momento para leer esta guía completa antes de usar su mesa.

INSTRUCCIONES DE PRECAUCIÓN

- (1) Mantenga la mesa periódicamente. Asegúrese de que todo esté seguro y que el cable no se haya deteriorado ni deshilachado. Asegúrese de que no haya grietas en la estructura de madera.
- (2) No sobrecargue la mesa más allá del límite de peso recomendado. Esto podría resultar en lesiones graves al usuario.
- (3) No utilice limpiadores a base de alcohol para limpiar el vinilo. Esto causa daños al material de vinilo. Use agua tibia con jabón y seque.
- (4) Cuando utilice la mesa, asegúrese de que las cuatro patas estén sobre una superficie plana sólida y al mismo nivel.


Montaje de la mesa

Coloque la mesa de lado, suelte las hebillas, abra parcialmente la mesa y retire los accesorios (FIGURA 1).



Figura 1

De pie detrás de la mesa agarre ambos mangos de la mesa y gírelos suavemente hacia afuera para abrir completamente la mesa. Las patas

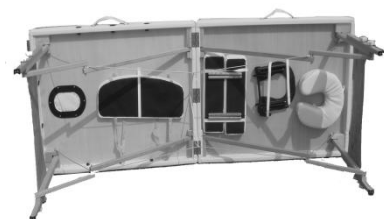

deben abrirse automáticamente (FIGURA 2).

Gire la mesa en posición vertical levantando el centro de la mesa. Presione hacia abajo en el medio de la mesa para asegurarse de que quede plana. Si la mesa tiene un pico en el medio, revise y enderece los cables.

Uso de la mesa y los accesorios

Le proporcionamos accesorios opcionales. Lea atentamente las instrucciones antes de su primer uso.

Reposacabezas:

El reposacabezas consta de una base de reposacabezas de media luna y una almohadilla de cara de media luna. Le dará a su cliente un cómodo soporte para la cabeza y la cara. Es posible que tenga una opción diferente para la base del reposacabezas. El reposacabezas ajustable le permite cambiar fácilmente el ángulo y la altura de la base ajustando la manija de la base (FIGURA 3).

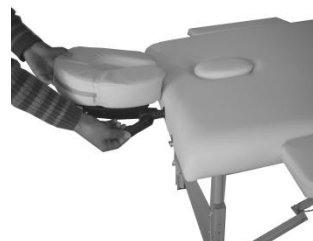


Figura 3

Estante reposabrazos ajustable:

Este estante de reposabrazos ajustable es un buen dispositivo para apoyar los brazos de su cliente en la parte delantera de la mesa. Cuelgue el estante del reposabrazos en las dos barras del reposacabezas y deslice el cinturón hacia arriba o hacia abajo para la posición óptima (FIGURA 4).



Figura 4

Cabestrillo de brazo:

Se trata de un accesorio de reposabrazos alternativo con la misma función que el estante del reposabrazos. Consulte las notas de uso del estante del reposabrazos.



Figura 5

Extensión de brazo lateral:

Esta es la opción de extensiones de brazos laterales para nuestra mesa. Estos apoyabrazos laterales acolchados extraíbles añaden el ancho de la mesa. Encajan en los orificios necesarios para accesorios en cada lado de la mesa. Eso proporcionará un cómodo soporte para los brazos, especialmente para clientes más grandes.

Ajuste de altura:

La altura adecuada de la mesa está determinada por la altura y la técnica del terapeuta. Puede ajustar la altura quitando la perilla de agarre de cada pierna. Reemplace las perillas después de ajustar cada pata a la posición deseada.


Límites de peso de la mesa:

Coloque al cliente en el centro de la mesa, esto ayudará a distribuir el peso de manera uniforme y garantizar la estabilidad. Siéntese suavemente cerca (no sobre) el centro de la mesa al principio y luego siéntese lo más cerca posible del centro (desde el borde) el peso de trabajo es el peso combinado del cliente y la cantidad máxima de presión hacia abajo que aplica el terapeuta. Por ejemplo, para un cliente que pesa 300 libras, el peso máximo de trabajo para la mesa es de 500 libras, la presión máxima hacia abajo que se puede aplicar con seguridad es de 200 libras, ya que la presión aplicada en un ángulo lateral ejerce una tensión considerablemente mayor sobre una mesa, la máxima presión hacia los lados. la presión no debe exceder el 50% de la presión descendente máxima.

NO EXCEDA EL PESO MÁXIMO DE TRABAJO

REFERIDO (Nunca exceda los límites de carga de la mesa;

Hacerlo puede resultar en lesiones graves y / o daños)

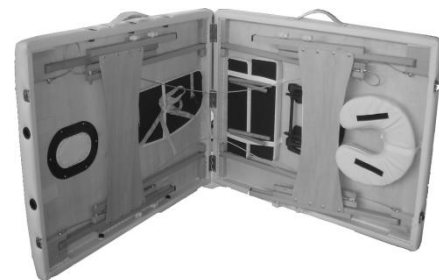

Almacenamiento:

Coloque la base del reposacabezas y la almohadilla para la cara en el elástico debajo de la mesa como se muestra.

Coloque todos los accesorios en su posición original. El estuche de transporte debe usarse al transportar o almacenar la

mesa para protegerla de daños. Cuando no esté en uso, guarde la mesa en un lugar fresco y seco y lejos de la luz solar directa. No exponga la mesa a temperaturas o humedad extremas (calientes o frías).

Cuidado de la mesa

Cuidado de la tapicería

Limpieza diaria: elimine la suciedad diaria y la mugre de la mesa con un jabón suave y una solución de agua tibia y seque con un paño suave que no suelte pelusa.

Desinfectante: desinfecte la mesa según sea necesario con un limpiador desinfectante de grado hospitalario a base de isopropanol (aprobado para su uso en vinilo de poliuretano).

Removedor de manchas: Algunas manchas menores se pueden quitar con un limpiador suave no abrasivo. Rocíe un paño húmedo con limpiadores y limpie suavemente para quitar la mancha, enjuague bien con agua tibia y seque con un paño suave sin pelusa. Las manchas más rebeldes pueden requerir una limpieza profesional.

Nota: nunca utilice limpiadores o productos químicos fuertes o abrasivos para limpiar la mesa. Hacerlo puede dañar la tapicería. Evite el uso de protectores, ya que pueden dañar el vinilo.

Cuidado de la madera:

Su camilla de masaje está hecha de maderas duras selectas y tiene un acabado de laca que no requiere cuidados especiales. Si lo desea, puede pulir ocasionalmente con un producto de calidad para el cuidado de la madera. Mantenga la mesa seca y evite la exposición a ambientes húmedos o mojados. Si la mesa se moja, seque rápida y completamente con un paño suave.

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar